

Baby-FIX mit Gurtfixierung

Seitenlagerungsschiene
mit Stabilisierungssteg



Indikation:

- Korrektur von Kopfasymmetrien (positive Beeinflussung des TAS)
- Therapie von Kopfgelenkstörungen (Geisel-Syndrom)
- Therapie von c-förmigen Säuglingsskoliosen mit reflektorische Kopfgelenkstörungen

Größe	Alter	Artikel Nr.:	PZN
Baby-Fix_6	0-3 Monate	2121-1-B	17282267
Baby-Fix_9	ab 3 Monate	2121-2-B	17282296

Vorteile:

- Zentrierung der Wirbelsäule
Zusätzlich fixation mit gepolsteten Bügel
- Nutzbarkeit für mehrere Monate bis Therapieabschluss
- Keine Gefahr von Druckstellen
- Rückenlage gewährleistet durch keilförmiges Schaumstoffkissen mit seitengleicher Druckverteilung
- 24h anwendbar unabhängig von Kleidungsstärke
- Wechselseitige Lagerung möglich
- Die variablen Fixationsgurte, in gerader oder überkreuzter Form, gewähren einen zusätzlichen Halt und mehr Stabilität

Kontraindikation:

- Keine Kontraindikationen, keine Anwendungsrisiken



Die Anwendung dieser neu konzipierten Seitenlagerungsschiene ist

BabyFIX-Seitenlagerungsschiene besteht aus 2 unterschiedlich großen Schaumstoffkeilen, die über einen Steg verbunden sind.

Dieser Verbindungssteg kann je nach Größe des Kindes variieren.

Der kleine Schaumstoffkeil (20 cm lang) dient quasi als „Bauchbremse“, damit der Säugling nicht aus der präferierten Seit-Rückenlage abweicht.

Der größere Keil (50 cm lang) dient zur Positionierung des Kindes.

Zum einen ist es möglich nur die Schulter des Säuglings

(auf der ipsilateralen Seite) minimal anzuheben, so dass das Köpfchen letztendlich zwanglos zur Gegenseite fällt.

Wird eine reine Seitenlage gewünscht, so kann der Keil, der als ungleichschenkliges Dreieck konzipiert ist, entsprechend gedreht werden.

Ein Wegdrehen auf den Bauch wird wiederum durch den kleinen Bauchkeil (Bauchbremse) verhindert.

Ein zusätzlicher Fixation ist durch gepolsterte Fixierungsbügel gegeben.

Das Kind befindet sich auch am nächsten Morgen noch in der gewünschten Lage.

Die Orthese ist so konzipiert, das sie 24h unabhängig von der jeweiligen Kleidungsstärke getragen werden kann.

Das gilt auch für die Kinder, die beispielsweise aufgrund einer angeborenen Hüftdysplasie mit einer Abspreizschiene versorgt sind.

Auch eine Gipsversorgung (Klumpfußgips) oder anderweitige Orthesen (Dennis-Brown-Schienen) behindern nicht.

BabyFIX kann auf jedem Kinderbettchen, als auch Kinderwagen angewendet werden.

Die Pflege der Lagerungsschiene ist denkbar einfach. Diese kann in die Wäsche, empfohlene Waschttemperatur 30°. Hygienehinweis!

Dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung des jeweiligen einen Säuglings bestimmt. Kein Wiedereinsatz!

Farben und Muster können vom Abbildungen abweichen.

